

# vizols

KAPLJICE ZA OKO

SI

BREZ KONZERVANSOV

0,21%

0,4%

Navodilo za uporabo - prosimo natančno preberite navodilo

## SESTAVA

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, natrijev hialuronat, prečiščena voda.

## NAMEN UPORABE

Vizol S 0,21% kapljice za suho oko so namenjene lažšanju **blagih težav** suhega očesa.  
Vizol S 0,4% kapljice za suho oko so namenjene lažšanju **večjih težav** suhega očesa.

Kapljice za oko služijo zaščiti, vlaženju in mazljivosti očesa. Uporaba kapljic omogoča hitro lažšanje težav.  
Motnje suhega očesa se lahko ublažijo in tako preprečijo komplikacije.

## SUHOST OČESA LAHKO NASTANE ZARADI:

- bolezn solznega filma, ki nastane zaradi pomanjkanja solz ali zaradi njihovega intenzivnega hlapenja, kar lahko povzroči poškodbo očesne površine in znake nelagodja.
- okolice (centralno ogrevanje, klimatizirani prostori, fluorescenčna svetloba, dim in veter)
- dolgotrajnega dela z računalnikom
- uporabe dekongestivnih kapljic za oči
- staranja (75% prebivalcev starejših od 65 let trpi za sindromom suhega očesa)
- nošenja kontaktnih leč
- operativnih posegov ali poškodb na očesu
- spola (hormonske spremembe pri ženskah med nosečnostjo, pri dojenju, med menstruacijo ali menopavzo)
- zdravil (antidepresivi, zdravila za povišan tlak, kontracepcija)
- bolezni (revmatoidni artritis, sladkorna bolezen, astma, bolezn štšilnice, glavkom).

Vizol S 0,21% kapljice za suho oko se lahko uporabljajo tudi med nošenjem kontaktnih leč.

Vizol S 0,4% so viskozne kapljice, ki zagotavljajo daljše zadrževanje natrijevega hialuronata na površini očesa, kar zagotavlja daljše vlaženje in boljše zaščito. Pri uporabi Vizol S 0,4% kapljic za suho oko priporočamo, da kontaktne leče pred vkapanjem odstranite iz očesa ter jih po 15 minutah ponovno vstavite.

Natrijev hialuronat je sestavni del naše očesne vodice in steklovine.

Vizol S kapljicah za suho oko natrijev hialuronat z vsakim mežikom ustvarja zaščitni film po površini očesa. Na ta način odstrani občutek suhosti, peska in razdraženosti očesa.  
Proizvodse uporabljajte tudi po operativnih posegih in prisuhem očesu, ki je posledica uporabe protivnetnih zdravil v očesu (poposvetu z zdravnikom).

## OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

### Ne uporabljajte kapljic Vizol S:

- v primeru preobčutljivosti (alergije) na natrijev hialuronat ali katero koli drugo sestavino Vizol S kapljic za oko.
- V primeru alergijske reakcije takoj prenehajte uporabljati proizvod in se posvetujte z zdravnikom.

### Druga opozorila:

- Če opazite, da sta Vizol S plastenka ali aplikator poškodovana, ne smete uporabiti izdelka.
- Z namenom zagotavljanja varne uporabe in ustrezne higiene, sme plastenko uporabljati le ena oseba.
- Medsebojno delovanje Vizol S kapljic za oko z raztopino za kontaktne leče, drugimi kapljicami za oko ali mazilici za uporabo očesa, ni znano. Če uporabljate še kateri koli drugi izdelek za oko, počakajte najmanj 15 min med posameznimi odmerjanji.

### Opomba:

Vizol S 0,4% lahko v trenutku zamegli vid, zato je priporočljivo, da v krajšem času uporabi ne upravljate vozil in strojev in počakate, dokler se vam ponovno ne zbistrislika.

## VARNOST PROIZVODA


Tehnologija aplikatorja plastenke vsebuje filter, ki zagotavlja, da je proizvod **varen za uporabo**, saj preprečuje onesnaženje po odprtju.

Proizvod ne vsebuje konzervansov, zato je manjša verjetnost, da bi povzročal iritacijo ali poškodbo površine očesa.  
Proizvod uporabniki na splošno dobro prenašajo, vendar, če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## NAVODILA ZA UPORABO

Kapljice uporabljajte večkrat dnevno, po potrebi. S pravilno uporabo ena plastenka zadostuje za 30 dni. Za daljšo uporabo se posvetujte z zdravnikom.

V okov kapajte 1-2 kapljici ter nekajkrat pomežiknite, da se raztopina enakomerno porazdeli po površini očesa. Ne vsebuje konzervansov, zato kapljice niso škodljive za uporabo v očesu.

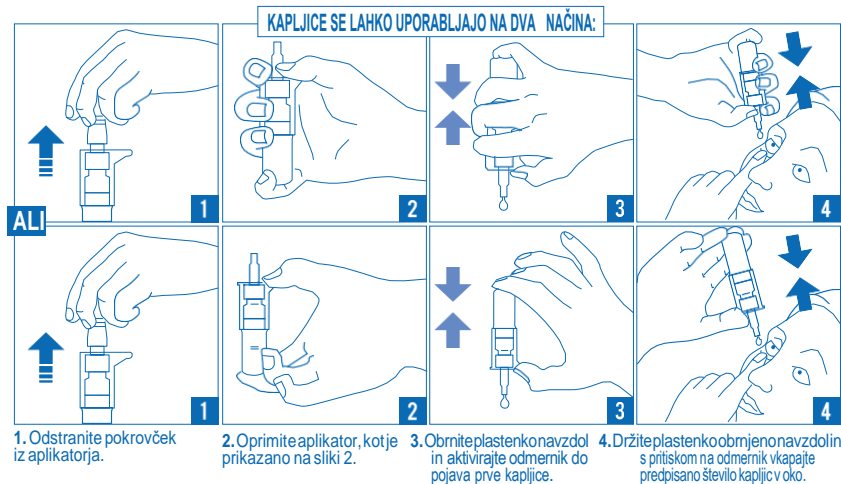

1. Odstranite pokrovček iz aplikatorja.
2. Oprinite aplikator, kot je prikazano na sliki 2.
3. Obrite plastenko navzdol in aktivirajte odmernik do pojave prve kapljice.
4. Držite plastenko obmerno navzdol s priskom na odmernik vkapajte predpisano število kapljic v oko.

130002135/08

# vizols

KAPLJICE ZA OKO

SI

BREZ KONZERVANSOV

0,21%

0,4%

## PROIZVAJALEC

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

## ROK UPORABNOSTI

Je odtisnjen na ovojnini.  
Rok uporabnosti po odprtju je 180 dni.  
Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

## SHRANJEVANJE

Proizvod shranjujte pri temperaturi do 30° C, v originalnem pakiranju.  
Shranjujte nedosegljivo otrokom.

## PAKIRANJE

10 ml

DATUM REVIZIJE NAVODILA ZA UPORABO: april 2019

POSKUSITE TUDI OSTALE KAPLJICE ZA SUHO OKO VIZOL S LINIJE:

PROIZVOD	NAMEN UPORABE	SESTAVA	VZROK MOTNJE	NAČIN UPORABE	UPORABA S KONTAKTNI MI LEČAMI	OBUČUTEK PO UPORABI
Vizol S 0,21%	Lajšanje manjših težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,21%	Dolgotrajno delo z računalnikom, nošenje leč, alergija, tujek, zunanji vzroki (suh zrak, dim).		Da	Takojšnja osvežitev in dolgotrajen občutek vlaženja.
Vizol S 0,4%	Lajšanje večjih težav suhega očesa	Natrijev hialuronat 0,4%	Staranje, terapija z zdravili, agresivni zunanji vzroki (veter, sonce, suh zrak).	V oko vkapajte 1 - 2 kapljici večkrat na dan oziroma po potrebi.	Ne	Takojšnje olajšanje in dolgotrajen občutek ugodjain mazljivosti. Proizvod lahko trenutno zamagli vid.
Vizol S INTENSIVE	Lajšanje težav suhega očesa in obnavljanje površine očesa	Natrijev hialuronat 0,15% deksantenol 2%	Mehanski dražljaji očesa: nošenje leč, operativni ali diagnostični posegi, zdravila.		Da	Takojšnja osvežitev in dolgotrajen občutek vlaženja.

## POJASNILO SIMBOLOV NA PROIZVODU

Preglej Navodila za uporabo!

Številka serije

CE oznaka

Zgornja omejitev temperature

Proizvajalec

Uporabno do

Sterilizirano po aseptični tehniki

Pozor! Preberite Navodila za uporabo (za Pomembna opozorila/previdnostne ukrepe)

STERILE A



1304

jgl

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE VIZOL S (ZBIRNA), SLOVENIJA		Colours	
	CODE 130002135	P 287	
VERSION 08	DATE 02.10.2019.	BLACK	
DIMENSIONS 150 x 300 NF	PHARMACODE 579; 580	Non printing colours	
EAN CODE	FONT Adobe Illustrator CS6		
PREPRESS			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. ispravka Date: 05.12.2019.	<input type="checkbox"/> 7. ispravka Date:		
<input checked="" type="checkbox"/> 2. ispravka Date: 16.12.2019.	<input type="checkbox"/> 8. ispravka Date:		
<input checked="" type="checkbox"/> 3. ispravka Date: 17.12.2019.	<input type="checkbox"/> 9. ispravka Date:		
<input checked="" type="checkbox"/> 4. ispravka Date: 17.12.2019.	<input type="checkbox"/> 10. ispravka Date:		
<input type="checkbox"/> 5. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 11. ispravka Date:		
<input type="checkbox"/> 6. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 12. ispravka Date:		